

# Anwender-Information

## „Download und Wiedergabe des Atemmoduls auf dem iPhone®“

### von Nilas MV

Regelmäßig erreichen uns Anfragen zu den unterschiedlichsten technischen Anliegen rund um Nilas MV®. Eine der häufigsten Fragestellungen aus dem Bereich der Alltagsanwendungen lautet: „Wie können meine Patienten/Klienten das per WeTransfer an sie versandte Atemmodul auf ihr iPhone® herunterladen, um es dort abzuspielen?“

Einige Besonderheiten des Smartphones aus dem Hause Apple® gestalten diesen Ablauf im Vergleich zu Android-Handys tatsächlich etwas weniger gradlinig. Wie man dennoch stressfrei in den Genuss des Atemmoduls auf dem iPhone® gelangt, erfahren Sie auf den nachstehenden Seiten.

### Hinweis


Die Benutzeroberfläche des verwendeten iPhones® hängt ab von der aktuellen iOS-(Update-)Version bzw. den Browser- und/oder App-Einstellungen. Die auf Seite 2 gezeigten Darstellungen können daher ggf. individuell etwas abweichen.

### Diese Apps werden benötigt

**Collect by WeTransfer.** Collect ist die beste Möglichkeit, Bilder, Audiodateien, Videos, Dokumente usw. aus Links auf dem iPhone® zu speichern. Die heruntergeladenen Inhalte werden dann mithilfe virtueller Pinnwände (sog. Boards) organisiert.

Zum App-Store:

[Download Collect by WeTransfer für iOS](#)

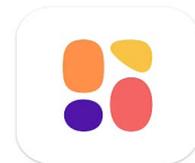

**VLC-Mediaplayer.** VLC ist eine freie portable Mediaplayer-Software, die die meisten Multimediadateien im Audio- und Videoformat sowie Dateiformate abspielen kann. Mit ihr wird das Atemmodul letztlich auf dem iPhone wiedergegeben.

Zum App-Store:


[Download VLC-Player für iOS](#)



**WICHTIG:** Bitte installieren Sie zunächst beide Apps auf dem iPhone®, bevor Sie fortfahren.

## Einrichten der App „Collect by WeTransfer“

1. Starten Sie nach der Installation diese App auf dem iPhone®, indem Sie auf das zugehörige App-Icon klicken.
2. Klicken Sie im ersten App-Fenster oben links auf „Skip“, um ohne Anmeldung fortfahren zu können.
3. Klicken Sie im nächsten Fenster unten auf „Continue without Account“, um ohne Kontoeröffnung fortfahren zu können.
4. Klicken Sie im nachfolgenden Fenster oben links auf „Skip“, um ohne kostenpflichtige Pro-Version fortfahren zu können.
5. Abschließend ist das Hauptmenü der App verfügbar.

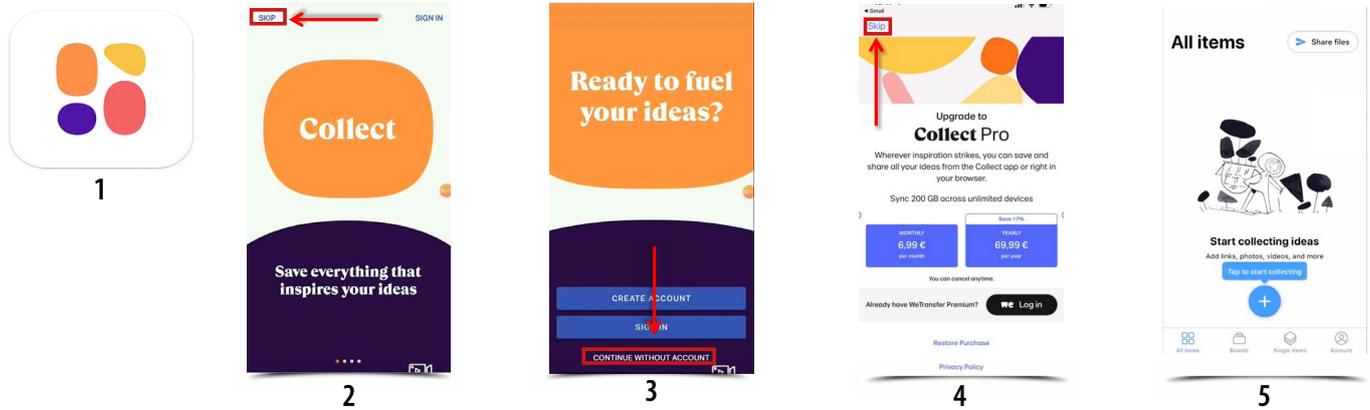

## WeTransfer-Download und Wiedergabe der Atemmodul-Datei auf dem iPhone®

1. Öffnen Sie zunächst die E-Mail von WeTransfer mit dem Download-Link in Ihrem E-Mail-Client auf dem iPhone® bzw. die SMS mit dem Download-Link von WeTransfer. Klicken Sie anschließend auf den Download-Link.
2. Der Link wird automatisch in der App „Collect by WeTransfer“ geöffnet. **ODER:** Sie werden ggf. gefragt, ob Sie mit einem der installierten Browser oder mit der App „Collect by WeTransfer“ den Link öffnen möchten. Wählen Sie in diesem Fall „Open with Collect“. Wird der Link über einen Browser geöffnet, kann man von dort aus über den Button „Save with Collect App“ fortfahren. In allen Fällen wird der Link in das Hauptmenü der App umgeleitet bzw. geladen.
3. Klicken Sie in der App auf „Save Item“, um den Download der verlinkten Video-Datei einzuleiten. Sobald der Download vollständig ist, erscheint die Infobox „Item saved in ‘Single Items’“ oder „Item added to ‘Sort Later’“. Klicken Sie nun auf den Button „Done“, um diesen Teilvorgang zu beenden.
4. Steuern Sie nun in der App die Video-Datei per Fingertip an. Diese Video-Datei im .avi-Format wird Ihnen dann in der Direktansicht nun zunächst als nicht abspielbar angezeigt.
5. Klicken Sie in dieser Ansicht nun am unteren Bildschirmrand auf das Pfeilsymbol. Es öffnet sich ein Menüband mit einer Auswahl an unterschiedlichen Apps, mit denen Sie die Datei weiterleiten oder bearbeiten können. Wählen Sie hier die App „VLC“, um das Atemmodul-Video auf dem iPhone® abzuspielen.

